

# Oxford Bond SE Mono

## Introduction d'Oxford Bond SE Mono Adhésif photopolymérisable auto-mordançant



## Adhésif auto-mordançant tout en un (photopolymérisable)

Oxford Bond SE Mono est un adhésif auto-mordançant tout en un offrant une très forte adhésion. Il prévient la sensibilité post-opératoire tout en permettant un gain de temps lors du traitement dentaire.

### Caractéristiques techniques et bénéfices

#### Caractéristiques techniques

- Adhésif auto-mordançant
- Très forte adhésion
- Un seul flacon

#### Bénéfices

- Moins de risques d'hypersensibilité chez le patient
- Application en une seule étape
- Indépendant de la mise en œuvre
- Étanchéité fiable
- Protège contre les micro-fuites
- Évite l'étape du mélange
- Gain de temps




# Oxford Bond SE Mono

Oxford Bond SE Mono : Force, flexibilité et facilité d'utilisation


## Oxford Bond SE Mono : Force !

Force adhésive de résistance au cisaillement à l'émail après photopolymérisation \*

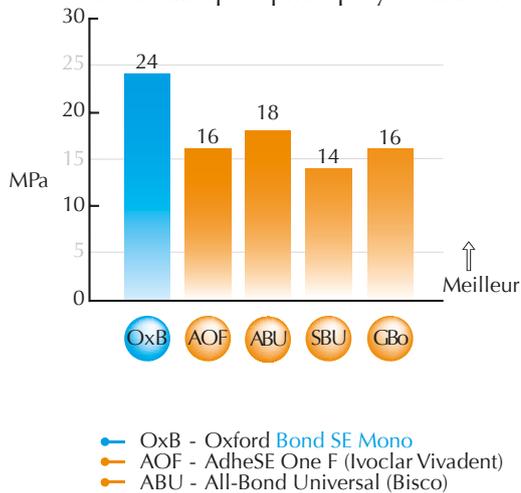

## Oxford Bond SE Mono : Flexibilité !

Force adhésive de résistance au cisaillement à la dentine après photopolymérisation \*

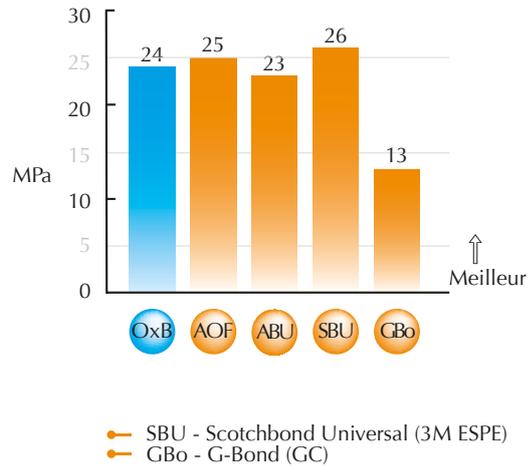

\*Données disponibles sur demande

## Oxford Bond SE Mono : Facilité d'utilisation

- 1- Appliquer sur une surface légèrement humide après agitation — 30 secondes
- 2- Disperser avec un flux d'air — 10 secondes
- 3- Photopolymériser — 20 secondes

\*Données disponibles sur demande

## Références produit

Oxford Bond SE Mono, adhésif photopolymérisable auto-mordant

| Réf.   | Produit             | Conditionnement |
|--------|---------------------|-----------------|
| 21-001 | Oxford Bond SE Mono | 1 x 5 ml flacon |