

Oxford Bond SE Dual

Introduction d'Oxford Bond SE Dual Adhésif universel auto-mordançant – Prise duale



Adhésif auto-mordançant, plus de polyvalence !

Oxford Bond SE Dual est un adhésif auto-mordançant, unique, simple à utiliser, qui a été développé pour les restaurations directes et indirectes. Oxford Bond SE Dual offre une liaison forte et stable entre les composites, compomères et matériaux à base de ciment verre ionomère renforcé à la résine et la dentine ou l'émail.


Caractéristiques techniques et bénéfices

Caractéristiques techniques

- Adhésif auto-mordançant
- Prise duale
- Très forte liaison
- Disponible en flacons ou en SingleMix

Bénéfices

- Moins de risques d'hypersensibilité chez les patients
- Moins d'étapes lors de l'application
- Facile à utiliser
- Peut être utilisé avec ou sans lampe à polymériser
- Polyvalent – utilisable avec tous les composites à polymérisation duale, chémo ou photo.
- Étanchéité marginale fiable
- Plus grand confort

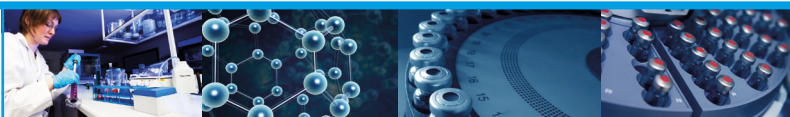


Oxford Bond SE Dual

Oxford Bond SE Dual : Force, polyvalence et simplicité d'utilisation


Oxford Bond SE Dual : Force !

Force adhésive de résistance au cisaillement entre des composites photopolymérisés et l'émail ou la dentine *

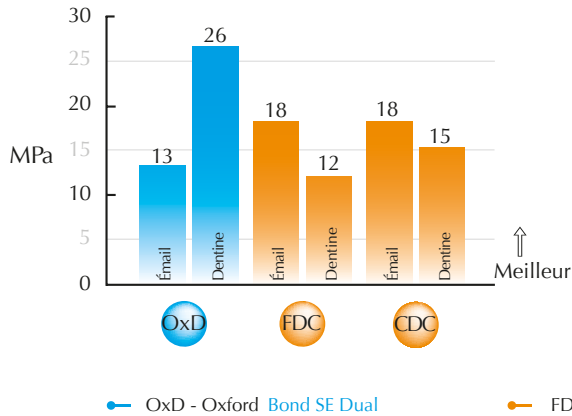

Oxford Bond SE Dual : Polyvalence!

Force adhésive de résistance au cisaillement entre des composites à prise duale en mode chimique et l'émail ou la dentine *

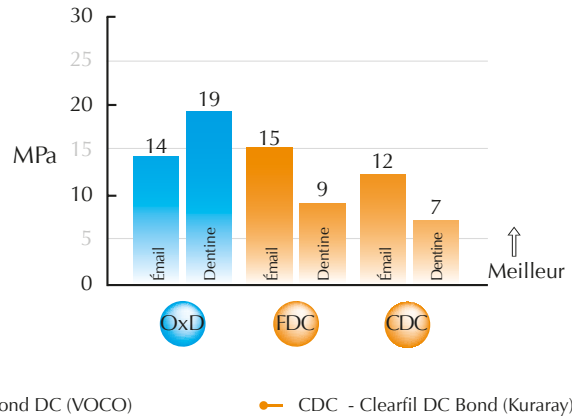

*Données disponibles sur demande

Oxford Bond SE Dual : Simplicité d'utilisation !

- 1 - Mélanger dans un puits de mélange ou dans la dose SingleMix 5 -10 secondes
- 2 - Appliquer sur une surface très légèrement humide en agitant 30 secondes
- 3 - Disperser avec un flux d'air 10 secondes
- 4 - Photopolymériser 20 secondes

Références produit

Oxford Bond SE Dual, adhésif universel auto-mordant à prise duale

Réf.	Produit	Conditionnement
21-002	Oxford Bond SE Dual	2 x 5 ml flacons avec 50 x microbrush®, 5 x gobets de mélange multi-puits
21-003	Oxford Bond SE Dual	35 x SingleMix à 0,15 ml avec 35 x microbrush®

Microbrush® est une marque déposée propriété de Microbrush International

 Oxford Scientific

Made in Germany by First Scientific Dental Materials GmbH

Space for you